

介護
保険 貸与


たよレール シリーズ

Free

たよレールフリー

室内タイプ


NEW

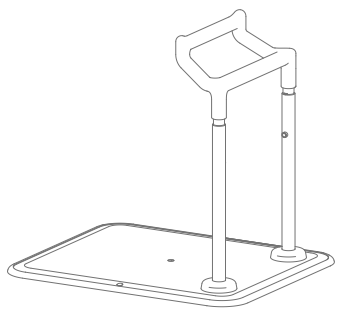

置ける手すり。



心地よく、

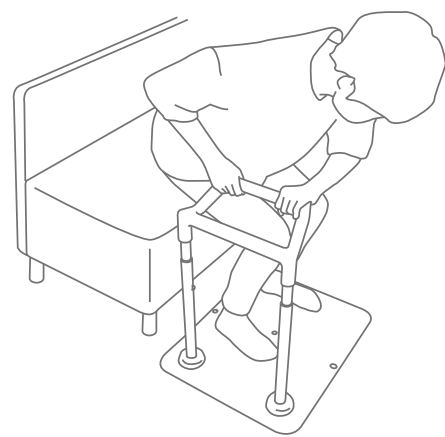



毎日の暮らしに寄り添う 優しい素材

ベースプレートにはカーペットのような肌触りの専用ベースマットを標準で付属。素足でも冷たさを感じにくく、スリッパや靴下でも滑りにくい仕様です。またグリップ部分は、握る力を入れやすいよう柔らかさのあるウレタン樹脂を使用しています。

とどりに置きたくなる カラーとデザイン

落ちつきのある柔らかなベージュカラーは、シンプルながら個性的な佇まい。寝室やリビング、玄関などのお部屋に置いていただいても、インテリアに馴染みます。




自由な使い方を生む 独自のカタチ

どこからでも握りやすい「口」の形をした手すり。体の正面で手すりを握った際に手首の角度が自然になり、腕に力が入りやすい形状です。手すり上段の高さは最大827mmまで調整可能で、立ち座りの補助はもちろんのこと、立位の保持や歩行補助にもお使いいただけるため、利用シーンが広がります。




ベッドサイド
で

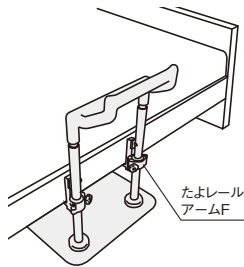


たよれール
アームF



ソファや
椅子の横に

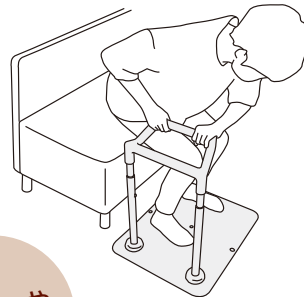

玄関や
廊下で

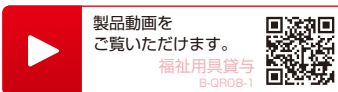

製品動画を
ご覧いただけます。
福祉用具賞与
B-QR08-1

立ち上がり動作では、体の重心が2段階に移動しています。



座った姿勢(端坐位・椅坐位)では、体の重心が座面の上にあります。そこから立ち上がるときに重心は斜め上へ移動しますが、そのまま真っすぐ斜め上に向かうわけではありません。


通常、体を前に傾けて椅子からお尻を離そうとしたとき(第1相)に重心が前下方に移動し、お尻が離れて関節を伸ばすまで(第2～3相)に上方へ移動する、2段階の重心移動が行われています。



目印マーカ― をうまく利用して、立ち上がり動作をスムーズに!

たよレールFreeのベースプレート中心についている茶色のベースキャップは、上図の「第2相」で重心移動をスムーズに行うための目印マーカ―です。この目印を見ることを意識してみてください。自然な動作で立ち上がることができます。

目印マーカ―

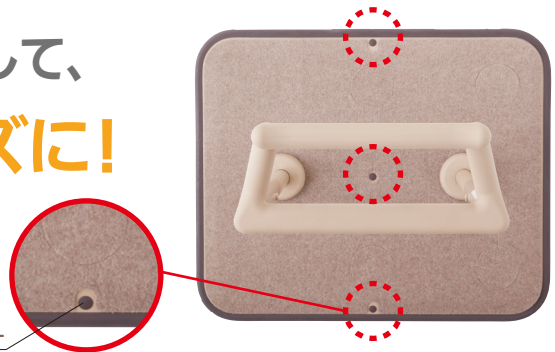


たよレールFreeを使った立ち上がり動作のポイント

- ①「足で体重を支える位置」と「上半身の重心」と「下半身の重心」が縦1列で並ぶように意識。
- ②膝よりも顔を前に出す。
- ③目印マーカ―をのぞき込み、手すりに鉛直方向の力をかけて、体を押し上げます。




たよレールFreeを体の正面に置いた時

手すり同士の間からベースプレート中心の目印マーカ―をのぞき込むように体重を前方に持っていき、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。

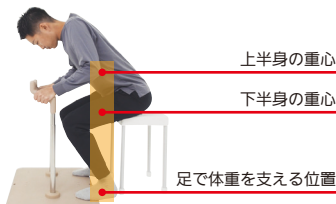

たよレールFreeを体の横に置いた時

ベースプレート先端の目印マーカ―をのぞき込むように体重を前方に持っていき、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。

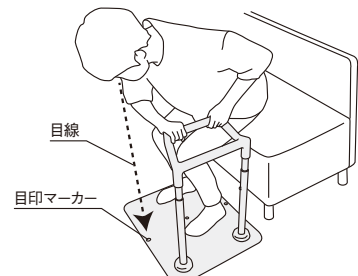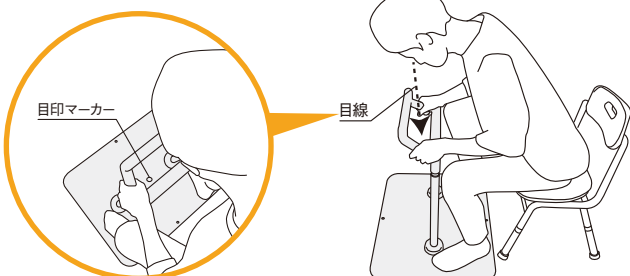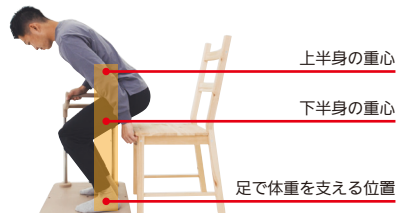




カーペットの
ような肌触りの
専用ベースマットが
ついています。

ベースプレートの縁ゴム
には傾斜をつけて、
つまづきにくく。

手すりは
この位置でも
使用できます。

※手すりの位置を変えても
TAISコードは同一です。

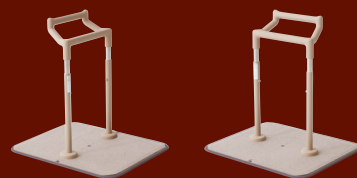

たよレールFree 貸与


040-4502

BZF-02

1台 **85,000円** (税抜き)

- 材質: 手すり/ステンレス(ウレタン樹脂被膜)・樹脂、ベースプレート/スチール・軟質樹脂、支柱/スチール、プレート裏フランジ/スチール、支柱カバー/軟質樹脂、ベースキャップ(目印マーカ)/樹脂、ベースマットF/ポリエステル(アクリル系吸着材)
- 性能: 防カビ仕様(ベースマットを除く樹脂部のみ) ●重量: 約14.0kg

TAIS 01265-000302

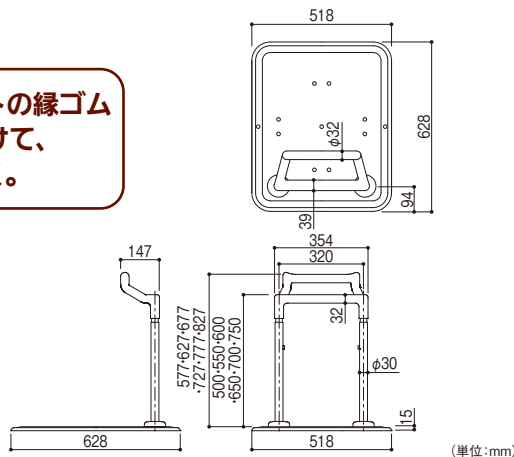

たよレールFree 関連商品

■たよレールFreeをベッドサイドで使用する際に取付けることで安定感が増します。



2個
1セット



たよレールアームF

040-4521

BZFO-01

1セット **12,500円** (税抜き)

- 材質: アルミ合金、半硬質樹脂、樹脂

TAIS 01265-000292

■手すりのすき間に手や頭が入り込むのを防ぎます。



たよレールガードF

040-4522

BZFO-02

1枚 **5,900円** (税抜き)

- 材質: 生地/ナイロン・ポリプロピレン、面ファスナー/ナイロン
- サイズ: 200×190mm (折りたたみ時)




TAIS 01265-000290

▲ 使用上のご注意



- 下図のように手すりをベースプレート端部に向向きで取付ける場合は、必ず「たよレールアームF」を使用し、ベッドフレームに密着させてください。

×

○ ベッドサイドでのみ設置可能

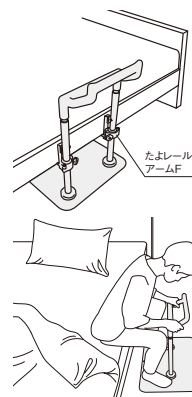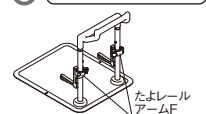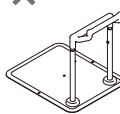

- 手すりをベースプレート中央に取付ける場合や、ベースプレート端部に向向きで取付ける場合は、ベッドフレームから離して右図のように使用できます。

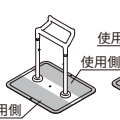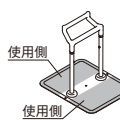

- たよレールFree及びたよレールFree用オプションは、絶対に指定製品以外や、電動ベッドのサイドバー・介助バーまたは、他社製品と組合せて使用しないでください。
- 床面の不陸が大きく、ベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。
- 屋外・浴室には設置しないでください。
- 定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- ご利用になる前に付属されている「取扱説明書」を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

マツ六は製品安全の向上に
取り組んでいます。



2020

製品安全対策
優良企業
経済産業省



2022

製品安全対策優良企業
経済産業省

弊社の安全・安心への取り組みはWebサイトににてご覧いただけます。

<https://www.mazroc.co.jp/safety/>

代理店

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>