

介護
保険 貸与

たよレール シリーズ

Free

たよレールフリー

水まわり兼用 タイプ

置ける手すり。




きれいに、

トイレなどで

立ち上がり
補助に

脱衣所などで
立位保持に

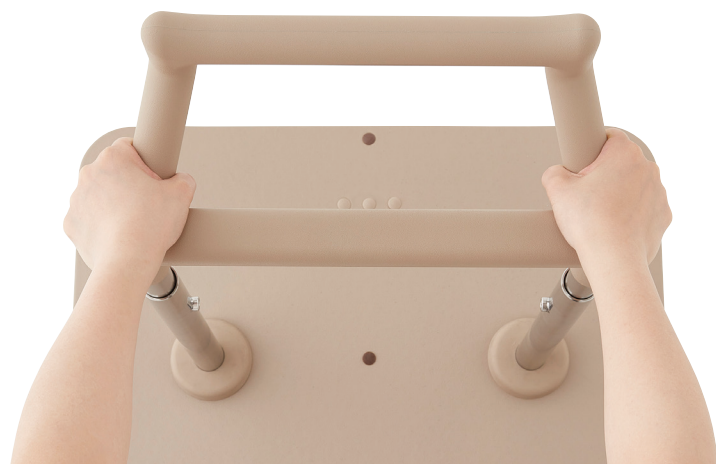



リラックススペースに 置きたくなる カラーとデザイン

落ちつきのある柔らかなベージュカラーは、シンプルながら個性的な佇まい。ほっと一息つきたい寝室やトイレなどのスペースにもしっかりと馴染みます。




水まわりでも使える 安心の素材

手すり芯材や支柱にはステンレスを使用し、ベースプレートはスチールに耐水性のある樹脂を被覆しています。防カビ仕様で水や汚れにも強く、お手入れしやすい素材です。またグリップ部分は汗や水で濡れた手でも滑りにくいよう、ウレタン樹脂を使用しています。



自由な使い方を生む 独自のカタチ

どこからでも握りやすい「口」の形をした手すり。体の正面で手すりを握った際に手首の角度が自然になり、腕に力が入りやすい形状です。手すり上段の高さは最大827mmまで調整可能で、立ち座りの補助はもちろんのこと、立位の保持や歩行補助にもお使いいただけるため、利用シーンが広がります。

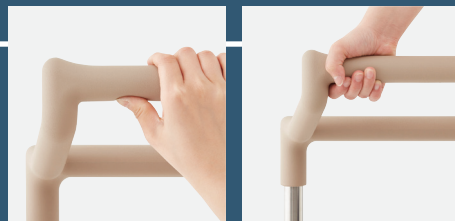


BZF-01 **貸与**※ 水まわり兼用タイプ

手すりはこの位置でも
使用できます。



※端の位置の場合は
浴室での使用不可。

※手すりの位置を変えてもTAISコードは同一です。

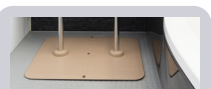



耐水性で浴室にも
設置できます。
※浴槽の中には設置できません。

※浴室で使用する場合は介護保険給付対象になりません。

Webで詳細図面をご覧ください。

**介護
保険 貸与**

(単位:mm)

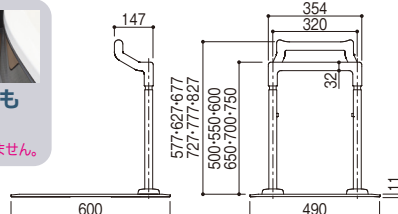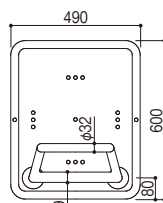

- ベースプレートはスチールに耐水性のある樹脂を被覆しています。
- 防カビ仕様で水や汚れにも強く、お手入れしやすい素材です。
- グリップ部分は汗や水で濡れた手でも滑りにくいよう、ウレタン樹脂を使用しています。

たよれールFree

040-4501 BZF-01

1台 **118,000円** (税抜き)

●材質: 手すり/ステンレス(ウレタン樹脂被膜)・樹脂、ベースプレート/スチール(樹脂被覆)・合成ゴム、調整プレートF/合成ゴム、支柱/ステンレス、プレート裏フランジ/ステンレス、支柱カバー/軟質樹脂、ベースキャップ/樹脂●性能: 防カビ仕様(ステンレス部を除く)●重量: 約12.5kg
※スパナ(呼び13mm)と六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

TAIS 01265-000289

立ち上がり動作のポイントは **重心の移動と目線**。 たよレールFreeがお手伝いします！



立ち上がり動作では、体の重心が2段階に移動しています。




座った姿勢(端坐位・椅坐位)では、体の重心が座面の上にあります。そこから立ち上がるときに重心は斜め上へ移動しますが、そのまま真っすぐ斜め上に向かうわけではありません。

通常、体を前に傾けて椅子からお尻を離そうとしたとき(第1相)に重心が前下方に移動し、お尻が離れて関節を伸ばすまで(第2～3相)に上方へ移動する、2段階の重心移動が行われています。



目印マーカ― をうまく利用して、 立ち上がり動作をスムーズに！

たよレールFreeのベースプレート中心についている茶色のベースキャップは、立ち上がり時の重心移動をスムーズに行うための目印マーカ―です。この目印を見ることを意識してみてください。自然な動作で立ち上がることができます。

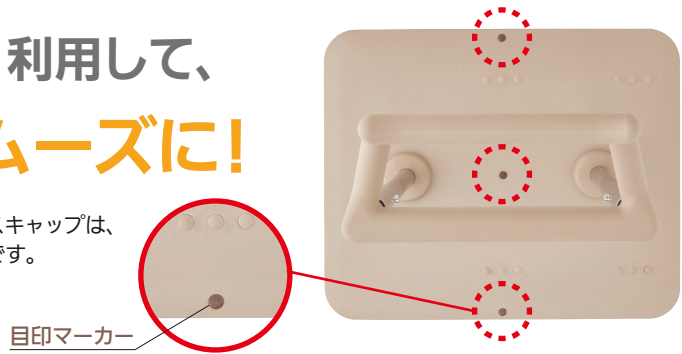

たよレールFreeを使った 立ち上がり動作 のポイント

- ①「足で体重を支える位置」と「上半身の重心」と「下半身の重心」が縦1列で並ぶように意識。
- ②膝よりも顔を前に出す。
- ③目印マーカ―をのぞき込み、手すりに鉛直方向の力をかけて、体を押し上げます。


たよレールFreeを 体の正面に置いた時

手すりと手すりのすき間からベースプレート中心の目印マーカ―をのぞき込むように体重を前方に持っていき、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。




たよレールFreeを 体の横に置いた時

ベースプレート先端の目印マーカ―をのぞき込むように体重を前方に持っていき、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。

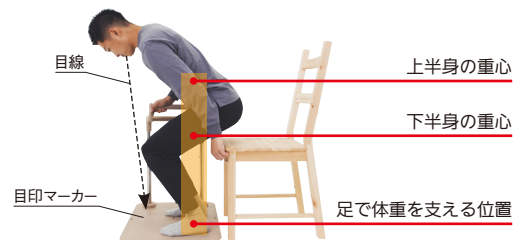

Webサイトでは使い方を動画でご説明しています！

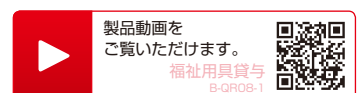


たよレールアームF


■たよレールFreeをベッドサイドで使用する際に取付けることで安定感が増します。



2個
1セット

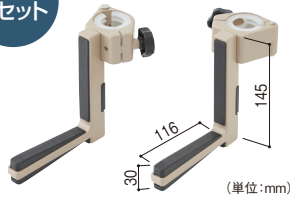


たよレールアームF
040-4521 BZFO-01
1セット 12,500円 (税抜き)
●材質: アルミ合金、半硬質樹脂、樹脂
TAIS 01265-000292

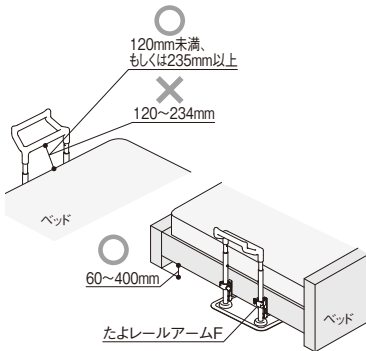

⚠ 使用上のご注意

●浴室内で使用する場合は、ベースプレート端部に手すりを取付けて設置しないでください。また、浴槽縁のまたぎ越し動作では使用しないでください。製品が不安定になり転倒する恐れがあります。

●浴槽の中には設置できません。
※浴室で使用する場合は介護保険給付対象になりません。

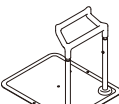


浴室では手すりを端部に取付けない





浴槽縁のまたぎ越しには使用しない

●下図のように手すりをベースプレート端部に外向きで取付ける場合は、必ず「たよレールアームF」を使用し、ベッドフレームに密着させてください。



×

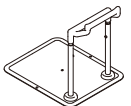

○ ベッドサイドでのみ設置可能

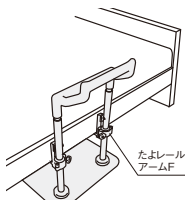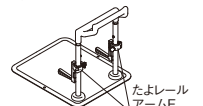

●手すりをベースプレート中央に取付ける場合や、ベースプレート端部に内向きで取付ける場合は、ベッドフレームから離して右図のように使用できます。

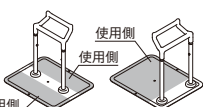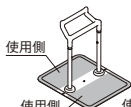

- たよレールFree及びたよレールFree用オプションは、絶対に指定製品以外や、電動ベッドのサイドバー・介助バーまたは、他社製品と組合せて使用しないでください。
- 床面の不陸が大きく、ベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。
- 設置する床材の取扱説明書、注意事項をよく確認してください。(ゴムの接触による変色に注意喚起されている床材の場合は、当商品の設置により変色する恐れがあります。)
- 屋外には設置しないでください。
- 定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- ご利用になる前に付属されている「取扱説明書」を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

代理店

たよレールガードF

■手すりのすき間に手や頭が入り込むのを防ぎます。

■浴室内でも使用できます。

※浴室でたよレールFreeを使用する場合は介護保険給付対象になりません。



たよレールガードF
040-4522 BZFO-02

1枚 5,900円 (税抜き)


●材質: 生地/ナイロン・ポリプロピレン、面ファスナー/ナイロン
●サイズ: 200×190mm (折りたたみ時)
TAIS 01265-000290

ベースマットF

■ベースプレート表面の滑りや冷たさを緩和します。

※浴室では使用できません。

屋内専用

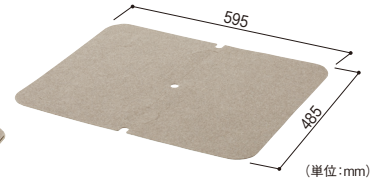

ベースマットF
040-4524 BZFO-04

1枚 3,000円 (税抜き)

●材質: マット/ポリエステル、吸着面/アクリル系吸着材
TAIS 01265-000295

調整プレートF

■たよレールFreeのベースプレートのガタツキを抑えるプレートです。

1セット
6枚入



※本体には1セット(6枚)が付属しております。
※追加で必要な場合にご購入ください。

調整プレートF
040-4523 BZFO-03

1セット(6枚入) 2,500円 (税抜き)

●材質: 合成ゴム

マツ六は製品安全の向上に取組んでいます。



2020
製品安全対策
優良企業
経済産業省



2022
製品安全対策優良企業
経済産業省

弊社の安全・安心への取り組みはWebサイトにてご覧いただけます。

<https://www.mazroc.co.jp/safety/>

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>

23.10 (M) 000