

介護
保険 貸与

たよレール シリーズ

SOTOE

たよレールソトエ

お出
かけ安心、
つな
がる手
すり。

突っ張り式で
足元スッキリ!
highタイプ

長さ1600mmまで!
わたレールEK

幅の狭いところに
スリム型

※スリム型は必ずわたレールEK
と組合せて使用してください。

どっしり安定
標準型

移動補助に!

たよレールSOTOE
ロング型

BZK-05



室内はマットでベースの
肌触りをやさしく!
たよレールSOTOE
ベースマットS ※室内専用
です。

マツ六は
製品安全の向上に
取組んでいます。



⚠️ ご注意

- 水たまりができる場所には設置しないでください。●浴室には設置しないでください。
- ヒーター(暖房機)等の前、床暖房の上には設置しないでください。
- 敷石などベースプレートより小さいものの上や、床面の不陸が大きくベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。
- たよレールシリーズは他社製品と組合せたり、連結したりしないでください。
- 定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- たよレールシリーズをご利用になる前に付属されている『取扱説明書』を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

CONTENTS

| | |
|--------------------------|---|
| たよレールSOTOE 標準型/スリム型/ロング型 | 2 |
| わたレールEK | 4 |
| たよレールSOTOE highタイプ | 5 |
| たよレールSOTOEとわたレールEKの連結 | 6 |
| たよレールSOTOEの組合せTAISコード | 7 |



お出かけ安心、置くだけ手すり。

たよレールSOTOE 標準型/スリム型/ロング型



ロング型

わたレールEK
との
組合せ例

- 軒先や玄関まわりのほか、室内でも使えます。
- オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、連続手すりとしても使用可能です。
※スリム型だけで連結させることはできません。
- 手すりの高さは750~900mmの間、50mmピッチで4段階の調整ができます。
- 手すり部は抗菌仕様です。
- ベースプレートはすべり止め加工付です。



スリム型

手すりはプレート中央にも設置OK!

プレート中央に手すりを設置すれば、段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。



スリム型を組合せれば階段にも連続して設置可能。

※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。


手すり高さは4段階に調整可能。



- わたレールEKはP.4をご覧ください。
- たよレールSOTOEとわたレールEKの連結についてはP.6をご覧ください。
- たよレールSOTOEとわたレールEKの組合せTAISコードはP.7をご覧ください。
- 裏表紙で住改手すりとの連結をご紹介します。

何台でも、コーナー部分でも、連結できます!

わたレールEKを使えば、何台でも連結できます。曲がり角や、階段の上端下端などでもOKです。
※必ず標準型・ロング型またはhighタイプを1台以上組合せてください。

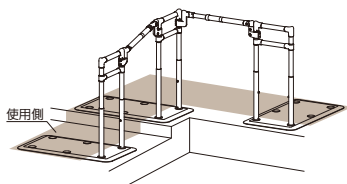

標準型



もちろん単品でのポイント使いもおすすめ。

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。
※スリム型は必ずわたレールEKと組合せて使用してください。



中央使い

端使い

標準型(BZK-01/02)

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

3
梱包 本体重量
約17.8kg

貸与

たよれールSOTOE 片手すり

040-4221 BZK-01

1台 91,000円(税抜き)

TAIS 01265-000248



**端部の「コブ」が
次の動作をお知らせ。**

手すり端部の「コブ」に手がかることで自然に動作が止まり、安全に次の動作へ。



5
梱包 本体重量
約20.6kg

貸与

たよれールSOTOE 両手すり

040-4222 BZK-02

1台 134,000円(税抜き)

TAIS 01265-000251



スリム型(BZK-03/04)

※スリム型は必ずわたれールEKと組合せて使用してください。

3
梱包 本体重量
約14.7kg

貸与

たよれールSOTOE 片手すり

040-4225 BZK-03

1台 91,000円(税抜き)

TAIS 01265-000259



スリム型は
階段の踏面など
狭いスペースに



5
梱包 本体重量
約17.1kg

貸与

たよれールSOTOE 両手すり

040-4226 BZK-04

1台 134,000円(税抜き)

TAIS 01265-000261



ロング型(BZK-05)

※単体を段差付近で使用する場合は、必ず段差の下に置いてください。

3
梱包 本体重量
約18.4kg

貸与

たよれールSOTOE

040-4421 BZK-05


1台 98,000円(税抜き)

TAIS 01265-000316

「ながーいタイプ」!



手すりは
プレート側
でも
OK!

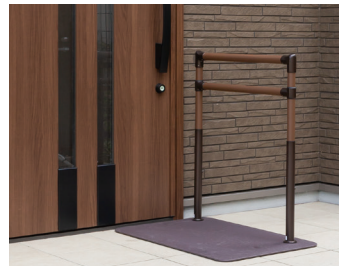


※ドアが開く側に設置する場合は、扉下に25mm以上のすき間が必要です。

BZK-01/02/03/04/05 共通仕様


●材質:手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金、ベースプレート/スチール・樹脂被覆、不陸調整ゴム/合成ゴム、支柱・座金/ステンレス●色:手すり/木目ダーク、ブラケット/ダークブロンズ、ベースプレート/Rブラウン●性能:抗菌仕様(手すり部)
※組立てには六角棒スパナ(呼び4mm)が別途必要です。

BZK-01/02/03/04 寸法図


(単位:mm)

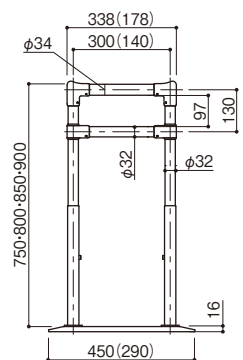

BZK-01/02/03/04 共通
※()はBZK-03/04

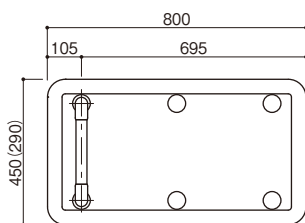


BZK-01/03
※()はBZK-03

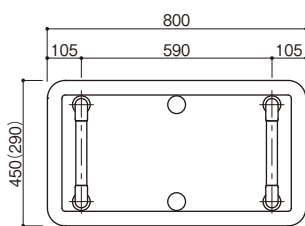

BZK-02/04
※()はBZK-04

BZK-05 寸法図

(単位:mm)

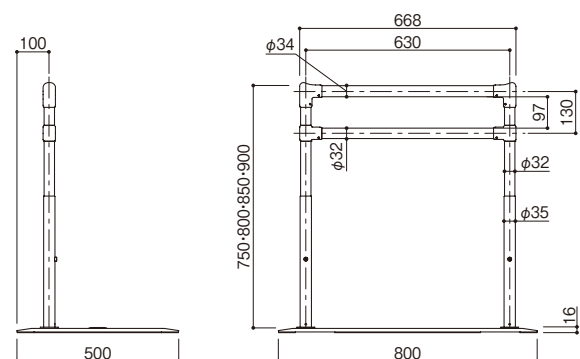

たよレールSOTOE 関連商品

室内での利用に...

■ベースプレートの肌触りをやさしくし、素足を保護します。





ベースマットSはカーペットのようなソフトな触れ心地。



BZKO-02・04

※()はBZKO-04

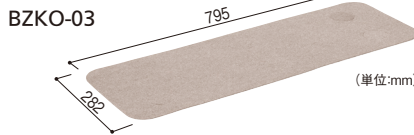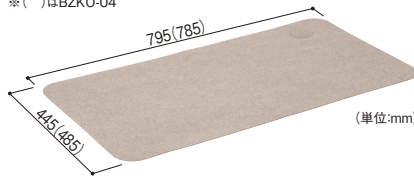


たよレールSOTOE ベースマットS

| | 商品コード | 品番 | 対応たよレール | 価格 | TAIS |
|-------|-----------------|---------|-----------|------------------------|--------------|
| 標準型用 | 040-4302 | BZKO-02 | BZK-01・02 | 1枚 3,600円 (税抜き) | 01265-000299 |
| ロング型用 | 040-4304 | BZKO-04 | BZK-05 | | — |
| スリム型用 | 040-4303 | BZKO-03 | BZK-03・04 | 1枚 3,000円 (税抜き) | 01265-000300 |

●材質: マット/ポリエステル、吸着面/アクリル系吸着材 ●色: ページュ

ガタツキ防止に...

■たよレールSOTOEのベースプレートのガタツキを抑えるプレートです。床の不陸に合わせて重ねてご使用ください。

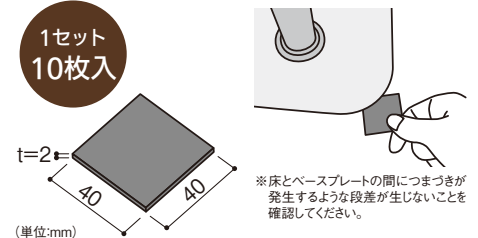

たよレールSOTOE 調整プレート

040-4301

BZKO-01

1セット(10枚入) **1,100円** (税抜き)



●材質: 合成ゴム ●色: 黒
※両面テープなどでベースプレートに貼付ける仕様ではありません。



わたレールEK

長さ570~1600mmまでOK!

- ピッチ570~1600mmまで広くカバー。伸縮できるたよレール連結用手すりです。
- 手すり部は抗菌仕様です。
- 上下方向に45°まで角度調整可能。段差のあるところにも設置できます。

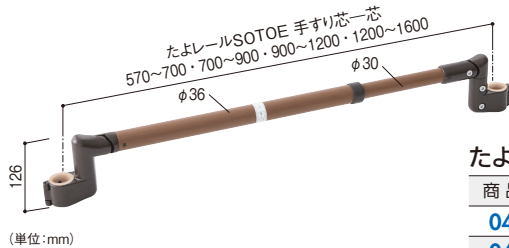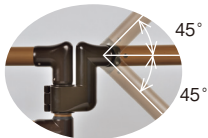

BZW-1612EKなら

たよレールSOTOE用連続手すり わたレールEK

| 商品コード | 品番 | 手すりピッチ | 価格 | TAIS |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------|--------------|
| 040-4241 | BZW-7057EK | 570~700mm | 1台 32,500円 (税抜き) | 01265-000255 |
| 040-4242 | BZW-9070EK | 700~900mm | | |
| 040-4243 | BZW-1290EK | 900~1200mm | | |
| 040-4244 | BZW-1612EK | 1200~1600mm | 1台 37,500円 (税抜き) | 01265-000303 |

●材質: 手すり/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント/アルミ合金 ●色: 手すり/木目ダーク、ジョイント/ダークブロンズ
●性能: 抗菌仕様(手すり部) ●付属品: スペース4個
●重量: BZW-7057EK/約1.5kg、BZW-9070EK/約1.7kg、BZW-1290EK/約2.0kg、BZW-1612EK/約2.5kg ●梱包: 1梱包
※組立てには六角棒スパナ(呼び2.5mm、4mm)が別途必要です。

対応たよレール全シリーズ(たよレールFree・UPDATEを除く)
※付属のスペーサーを使用してφ32・34・35の手すりに対応します。

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結についてはP.6をご覧ください。


たよレールSOTOE

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結

下記の×が付いている組合せで連結しないでください。安定性が無くなり転倒の恐れがあります。

①標準型・ロング型・highタイプのみで連結する場合

標準型・ロング型・highタイプ

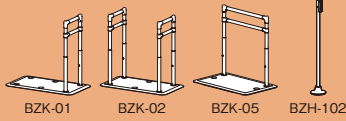


わたレールEK


BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK

以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。


- ✓ 標準型・ロング型の場合は、ベースプレートの上に動線があること
- ✓ 標準型・ロング型の場合は、手すりとわたレールEKの水平角度が90°以上

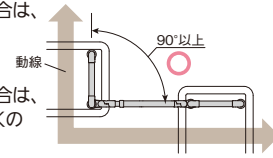


✓ わたレールEKの勾配が45°以下

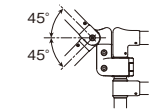

OK連結例

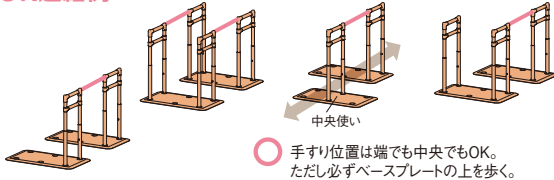


NG連結例

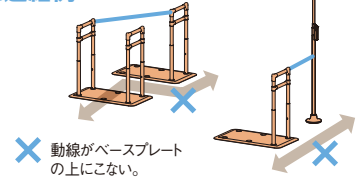

②スリム型を含めて連結する場合

スリム型

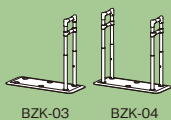


わたレールEK

BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK


以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。

- ✓ 1台以上の標準型・ロング型・highタイプまたは既設手すり棒と連結している(スリム型だけの連結はできません)
- ✓ 標準型・ロング型・highタイプまたは既設手すり棒



- ✓ ベースプレートの上に動線があること
- ✓ 連結の端部に置くスリム型の手すりとはわたレールEKに角度をつけない

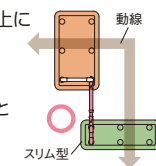



✓ わたレールEKの勾配が45°以下

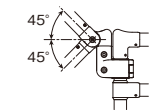

OK連結例

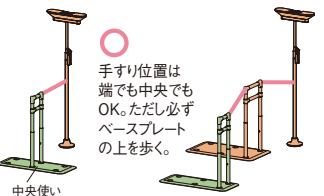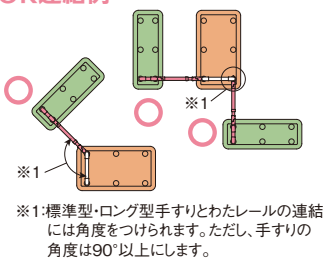


NG連結例

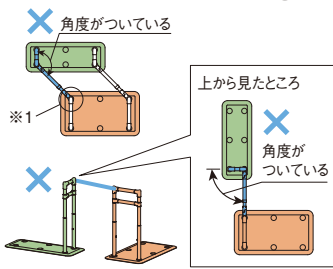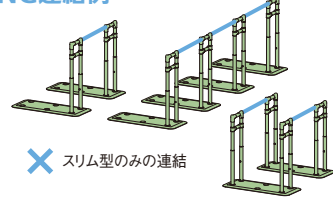


下記の場合には例外として角度がつけられます。


- ✓ 3台以上の両手すりを連結する場合

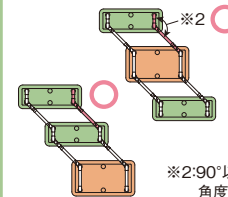


- ✓ 3台以上の片手すりでも連結しスリム型が中間にくる場合

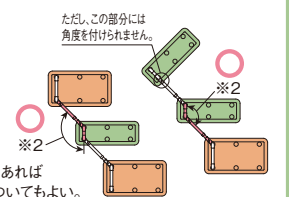


- ✓ highタイプと連結する場合

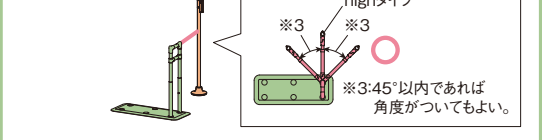

●上記①②の条件をクリアしていれば段差部でも取付け可能です。

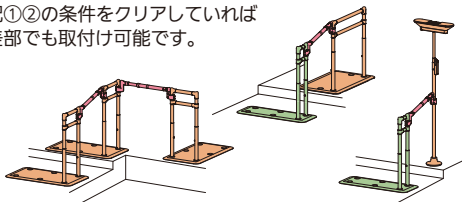

●上記①②の条件をクリアしていれば何台でも連結可能です。

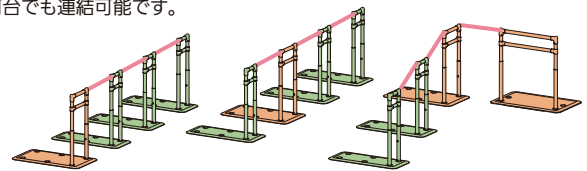


わたレールEKで連結した場合の段差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、取付け角度は0°~45°の間で自由に調節できます。下の表は目安としてください。

例) 3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたレールEKで連結させて使用する場合、まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうことが確認できます。手すり長さが900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなりすぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さが1200mmまで伸縮できるBZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよさそうです。

| A 手すり長さ | 570mm | 700mm | 900mm | 1200mm | 1600mm | |
|---------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|
| B 伸縮部の長さ | 426mm | 556mm | 756mm | 1056mm | 1456mm | |
| C 対応段差高さ(最大は取付け角度が45°のとき) | 0~301mm | 0~393mm | 0~534mm | 0~746mm | 0~1029mm | |
| D ベースプレート間の距離※ | 角度0° | 420mm | 550mm | 750mm | 1050mm | 1450mm |
| | 角度45° | 295mm | 387mm | 528mm | 740mm | 1023mm |
| E わたレールEKの対応範囲 | BZW-7057EK | | BZW-9070EK | | BZW-1290EK | |
| | 570mm | 700mm | 900mm | 1200mm | 1600mm | |



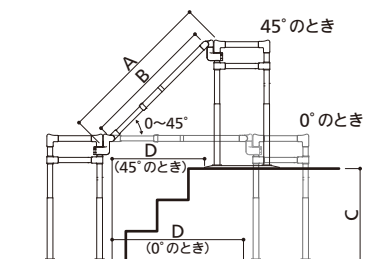


※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直線で連結した場合です。







たよれールSOTOEの組合せTAISコード

※2025年9月現在


BZK-01/02/03/04/05(単体) + わたれールEK【ト型】

| SOTOE(単体) | わたれール | 組合せ | SOTOE セット品番 | 価格 | TAIS | 貸与 マーク | | | |
|---|-------|-----|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----|
| BZK-01  | + | = | BZW-7057EK 1台 | BZK-01S-7057 | 1セット 123,500円 (税抜き) | 01265-000250 | 貸与 | | |
| | | | BZW-9070EK | BZK-01S-9070 | | | | | |
| | | | BZW-1290EK | BZK-01S-1290 | | | | | |
| | | | BZW-1612EK | BZK-01S-1612 | 1セット 128,500円 (税抜き) | 01265-000304 | 貸与 | | |
| + | = | = | BZW-7057EK 2台 | BZK-01SW-7057 | 1セット 156,000円 (税抜き) | 01265-000256 | 貸与 | | |
| | | | BZW-9070EK | BZK-01SW-9070 | | | | | |
| | | | BZW-1290EK | BZK-01SW-1290 | | | | | |
| | | | BZW-1612EK | 設定がありません。 | | | | | |
| BZK-02  | + | = | = | BZW-7057EK 1台 | BZK-02S1-7057 | 1セット 166,500円 (税抜き) | 01265-000263 | 貸与 | |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-02S1-9070 | | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-02S1-1290 | | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-02S1-1612 | 1セット 171,500円 (税抜き) | 01265-000305 | 貸与 | |
| | + | = | = | = | BZW-7057EK 2台 | BZK-02S-7057 | 1セット 199,000円 (税抜き) | 01265-000252 | 貸与 |
| | | | | | BZW-9070EK | BZK-02S-9070 | | | |
| | | | | | BZW-1290EK | BZK-02S-1290 | | | |
| | | | | | BZW-1612EK | BZK-02S-1612 | 1セット 209,000円 (税抜き) | 01265-000306 | 貸与 |
| + | = | = | = | BZW-7057EK 4台 | BZK-02SW-7057 | 1セット 264,000円 (税抜き) | 01265-000257 | 貸与 | |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-02SW-9070 | | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-02SW-1290 | | | | |
| | | | | BZW-1612EK | 設定がありません。 | | | | |
| BZK-03  | + | = | = | BZW-7057EK 1台 | BZK-03S-7057 | 1セット 123,500円 (税抜き) | 01265-000260 | 貸与 | |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-03S-9070 | | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-03S-1290 | | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-03S-1612 | 1セット 128,500円 (税抜き) | 01265-000307 | 貸与 | |
| BZK-04  | + | = | = | BZW-7057EK 1台 | BZK-04S1-7057 | 1セット 166,500円 (税抜き) | 01265-000264 | 貸与 | |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-04S1-9070 | | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-04S1-1290 | | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-04S1-1612 | 1セット 171,500円 (税抜き) | 01265-000308 | 貸与 | |
| | + | = | = | = | BZW-7057EK 2台 | BZK-04S-7057 | 1セット 199,000円 (税抜き) | 01265-000262 | 貸与 |
| | | | | | BZW-9070EK | BZK-04S-9070 | | | |
| | | | | | BZW-1290EK | BZK-04S-1290 | | | |
| | | | | | BZW-1612EK | BZK-04S-1612 | 1セット 209,000円 (税抜き) | 01265-000309 | 貸与 |
| BZK-05  | + | = | = | BZW-7057EK 1台 | BZK-05S-7057 | 1セット 130,500円 (税抜き) | 01265-000320 | 貸与 | |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-05S-9070 | | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-05S-1290 | | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-05S-1612 | 1セット 135,500円 (税抜き) | 01265-000321 | 貸与 | |


BZK-01/02/03/04(組合せ) + わたれールEK

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|----------------|----------------------------|--------------|----|
| BZK-01 (2台)  | + | = | = | BZW-7057EK 1台 | BZK-01W-7057 | 1セット 214,500円 (税抜き) | 01265-000249 | 貸与 |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-01W-9070 | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-01W-1290 | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-01W-1612 | 1セット 219,500円 (税抜き) | 01265-000310 | 貸与 |
| BZK-01 + BZK-03  | + | = | = | BZW-7057EK 1台 | BZK-0103W-7057 | 1セット 214,500円 (税抜き) | 01265-000265 | 貸与 |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-0103W-9070 | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-0103W-1290 | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-0103W-1612 | 1セット 219,500円 (税抜き) | 01265-000312 | 貸与 |
| BZK-02 (2台)  | + | = | = | BZW-7057EK 2台 | BZK-02W-7057 | 1セット 333,000円 (税抜き) | 01265-000253 | 貸与 |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-02W-9070 | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-02W-1290 | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-02W-1612 | 1セット 343,000円 (税抜き) | 01265-000311 | 貸与 |
| BZK-02 + BZK-04  | + | = | = | BZW-7057EK 2台 | BZK-0204W-7057 | 1セット 333,000円 (税抜き) | 01265-000266 | 貸与 |
| | | | | BZW-9070EK | BZK-0204W-9070 | | | |
| | | | | BZW-1290EK | BZK-0204W-1290 | | | |
| | | | | BZW-1612EK | BZK-0204W-1612 | 1セット 343,000円 (税抜き) | 01265-000313 | 貸与 |

BZH-102 (highタイプ) + わたれールEK

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|---|----------------------------|--------------|----|
| BZH-102  | + | = | = | BZW-7057EK 1台 | — | 1セット 97,500円 (税抜き) | 01265-000314 | 貸与 |
| | | | | BZW-9070EK | — | | | |
| | | | | BZW-1290EK | — | | | |
| | | | | BZW-1612EK | — | 1セット 102,500円 (税抜き) | 01265-000315 | 貸与 |

■ TAISコードは、公益財団法人テクノエイド協会のHP (<https://www.techno-aids.or.jp/>) でご確認ください。
 ■ TAISコードは、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)サービスを利用する際、請求書に記入します。(各市町村により、コード記入の必要がない場合もございます。)
 ■ TAISコードは、商品の組合せにより異なります。 ■ ご注文は商品コード(7桁)でお願いします。※TAISコードではご注文をお受けできませんのでご注意ください。

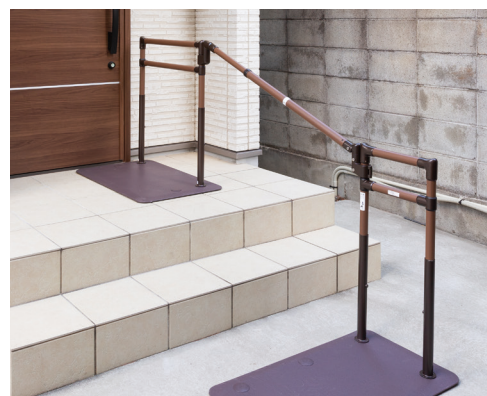

※ドアが開く側に設置する場合は、扉下に25mm以上のすき間が必要です。

たよレールSOTOEは住宅改修用手すりや、他のたよレールシリーズとも連結できます。

BAUHAUS フリーレールの手すり棒 (木目ダーク)、ブラケット (ダークブロンズ) と色を合わせています。

また、**BAUHAUS** 住宅改修用手すり・他のたよレールシリーズ (Free・UPDATEを除く) との連結も可能です。



アプリも登録も不要!

MAZROC WebAR

スマホで
デモ機

まるでそこに
あるみたい

手すりを **実物大で**
バーチャル配置!

さっそく
ARで手すりを
置いてみる ▶

たよレールSOTOE も対応!!

未来を変える一歩をいっしょに。

地球に優しい福祉用具のサーキュラーエコノミー。

たよレールシリーズ

MOTOE
モトエプロジェクト

たよレールSOTOEは
モトエプロジェクトの対象商品です。

代理店

マツ穴株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255 FAX 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>

25.10②(M)000