

取扱説明書

- この度は「たよレールガードF」をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問合せは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールガードF BZFO-02

マークの種類について

⊘ 禁止行為 ⚠ 必ず行う

⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容


- ⊘ 絶対に指定製品以外や、他社製品と組合せて使用しない。

⚠ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- ⊘ 火気を近づけたり、ヒーター等(暖房機)の前で使用しない。
- ⊘ たよレールFreeの手すり部に手や頭が入り込む事を防止する製品であり、本来の使用目的以外では絶対に使用しない。
- ⊘ 分解、改造、加工は絶対にしない。

取付可


たよレールFree
BZF-01・BZF-02

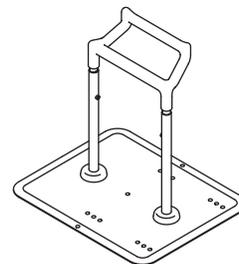

- ⚠ 設置、取りはずしは必ず納入業者様が行う。
- ⚠ 製品が著しく変形損傷した場合は交換する。


取付方法

1. 面ファスナーの向きを確認して上段の手すり
タブをかける。

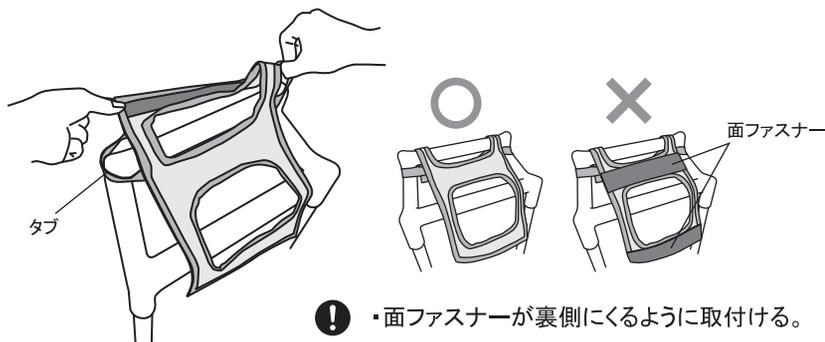


- ⚠ 面ファスナーが裏側にくるように取付ける。

2. 上段手すり側の面ファスナーを貼付ける。

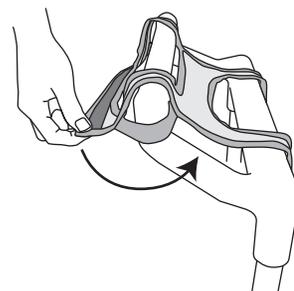


- ⚠ 面ファスナーはズレがないようにきれいに貼る。

3. 下段手すり側の面ファスナーを貼付ける。

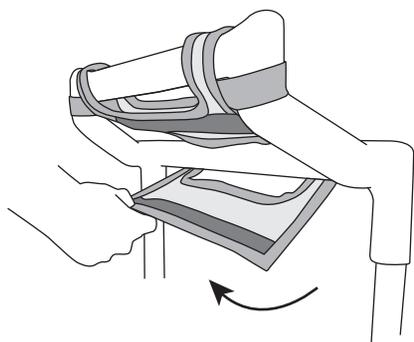

- ⚠ 面ファスナーはズレがないようにきれいに貼る。

4. タブがはずれていない事、横ずれしない事を
確認する。

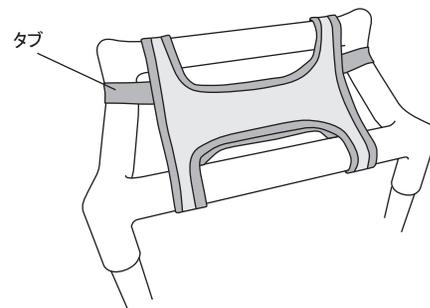

お手入れ方法

1. 40度までの液温で中性洗剤を使用し手洗いする。
2. 弱く手絞りする。
3. 手絞り後は速やかに日陰でぬれ平干しする。

洗濯表示



- ⊘ 酸性、アルカリ性洗剤やシンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しない。(変形変色の原因となる。)
- ⊘ 柔軟剤や塩素系漂白剤、洗濯機、乾燥機、アイロンは使用しない。(変形変色の原因となる。)
- ⊘ クレンザー、磨き粉、ナイロンたわし等は使用しない。(傷の原因となる。)

- ❗ お手入れ後は必ず日陰でぬれ平干しする。
(直射日光があたると変形変色の原因となる。また、洗濯ばさみ等で挟むと跡のこりの原因となる。)

廃棄方法

- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄する。

点検

- 定期的に点検を行い、変形損傷等異常がないか確認する。

- ❗ 異常があった場合は、直ちに使用を中止し納入業者へ相談する。

基本仕様

品名: たよレールガードF BZFO-02

材質: 生地/ナイロン、ポリプロピレン 面ファスナー/ナイロン

寸法: 200×190mm(折りたたみ時)

原産国: 日本

※商品改良の為、仕様・デザインなど断りなく変更することがありますのでご了承ください。



〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>

2023年3月1日改定